

# Belangrijke informatie van MAKERS4ALL en voor het gebruik van de beschermingsmiddelen

## Veel plezier met uw beschermingsmiddelen

In deze brief vind u belangrijke informatie omtrent onze beschermingsmiddelen.

### Donaties

We kunnen alle hulp gebruiken!

Door het hele land verspreid zijn op dit moment allemaal MAKERS, aangesloten bij MAKERS4ALL, bezig om beschermingsmiddelen te maken voor mensen in de zorg. We gaan heel snel door onze materialen heen en zijn met elke bijdrage enorm blij!!

Hoe meer we kunnen MAKEN, hoe meer we kunnen helpen!

Wilt u een Donatie doen om onze MAKERS te helpen met de gemaakte kosten? Dat is ontzettend lief en welkom!

U kunt ons ondersteunen met een financiële bijdrage via

<https://www.makers4all.eu/nl/donors/doneren>

of handmatig, via Rekeningnummer NL30 TRIO 0254 320694 t.n.v. HWF met vermelding 'makers4all' of 'corona'



### Feedback

Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback uit de praktijk! We zijn erg flexibel in het doen van aanpassingen en hebben getalenteerde ontwerpers in onze MAKERS4ALL Community. Via het formulier: [MAKERS4ALL - WHAT CAN WE IMPROVE?](#) kunt u uw bevindingen met ons delen.

Dit formulier kunt u vinden op de website:

<https://www.makers4all.eu/nl/vragers>



### Schoonmaakinstructie

Al onze producten zijn **HERBRUIKBAAR!!!**

Voor alle producten geldt, dat je de onderdelen kunt schoonmaken door:

- ze in een sopje te doen. Om het sopje te maken kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld allesreiniger of afwasmiddel. **LET OP:** Gebruik hiervoor lauwwarm of koud water. De 3D-geprinte onderdelen kunnen vervormen bij gebruik van te warm water.
- of ze schoon te maken met alcohol of met chloor.

Na vele malen schoonmaken kan het zijn dat de sheets minder helder worden, doordat er wat krassen ontstaan. Sheets kun je zelf vervangen door transparante schutbladen van 100-300 micron. 150 a 180 micron zijn het fijnst. Tevens is zijn PET sheets meestal wat helderder dan PVC sheets. Deze zijn te verkrijgen via kantoorboekhandels.



## De kleine lettertjes!

### Vrijwaring van aansprakelijkheid

MAKERS4ALL Nederland is een platform van onafhankelijke vrijwilligers, die als doel heeft het ontwikkelen en verstrekken van ge-3D-printe producten om beschermingsmiddelen tegen het coronavirus van te maken, met behulp van 3D-print techniek. De volledige beschermingsmiddelen zijn ontworpen door individuele vrijwilligers en worden gedeeld onder open source licenties. Om onze vrijwilligers optimaal juridisch te beschermen wijzen we u erop dat u akkoord gaat met de volgende afspraken:

- MAKERS4ALL garandeert niet dat de ge-3D-printe producten, welke steeds als unieke print worden gemaakt, correct werken of aan enige wettelijke eisen voldoen. Deze 'uitsluiting van de aansprakelijkheid' is bedoeld om aan te geven, dat MAKERS4ALL deze ontwerpen aanbiedt zonder enige vorm van garantie en iedere aansprakelijkheid voor schade uitsluit. Ieder gebruik geschiedt geheel voor eigen risico. Mocht er iets mis zijn, zijn we natuurlijk blij met feedback en zullen we de ge-3D-printe producten graag vervangen door nieuwe exemplaren.


- De ontvanger van de producten om het beschermingsmiddel te maken accepteert het risico van het in elkaar zetten van het product en het gebruik als beschermingsmiddel tegen het coronavirus.
- Risico's zijn onder meer eventueel letsel bij beschadiging of bij breuk, consumptie of ten gevolge van het niet goed reinigen van het product.
- Het ontwerp is niet bedoeld voor commercieel gebruik en het mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
- De uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid geldt voor MAKERS4ALL maar ook ten behoeve van alle vrijwilligers die daarbij zijn aangesloten of die de ontwerpen hebben gemaakt of aanbieden.
- Alle informatie die wordt verstrekt door MAKERS4ALL en personen die geassocieerd zijn met MAKERS4ALL is nimmer bedoeld om gebruikt te worden of erop te vertrouwen dat daarmee een gezondheidsprobleem of ziekte kan worden voorkomen.

**Namens de MAKERS.**


# Belangrijke informatie van MAKERS4ALL en voor het gebruik van de beschermingsmiddelen

## Assemblage instructie gelaatsscherm/face shield


1. Zorg dat je handen goed gewassen zijn.
2. Pak het frame en een transparant vel, dit vel moet aan 1 kant geperforeerd worden met een standaard 4 gats-perforator op stand 888 als dat nog niet zo zou zijn.

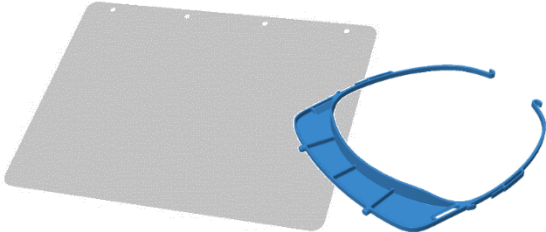

3. Bevestig nu het transparante vel aan het frame; begin aan 1 kant, doe het pinnetje van het frame door het buitenste gaatje van het vel en zorg dat het uiteinde van het transparante vel NIET onder het flapje zit.

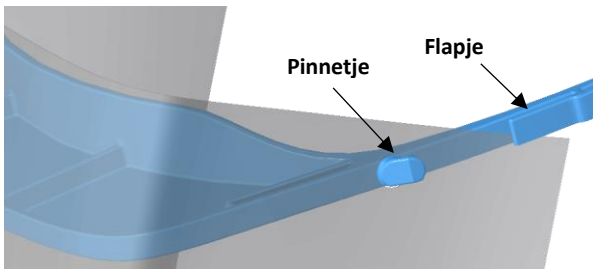


4. Bevestig nu het transparante vel aan de andere kant aan het pinnetje. Houd het sheet daarbij een beetje schuin, zoals op het plaatje hieronder.

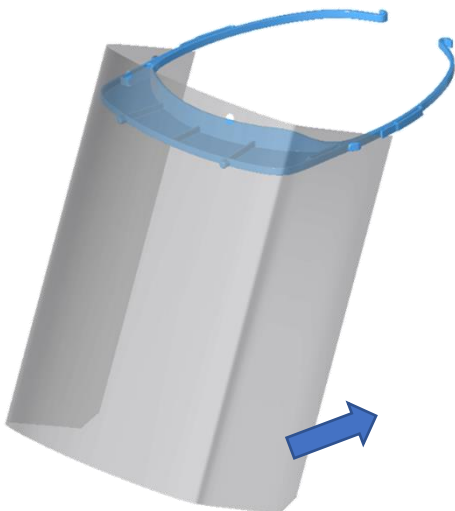

5. Draai nu het transparante vel in de richting van de pijl voorzichtig op zijn plaats, zodat de pinnetjes aan de voorkant in de gaatjes vallen.
6. Steek het uiteinde van het vel onder het flapje.
7. Je bent nu klaar met in elkaar zetten.
8. Soms zit het gelaatsscherm niet strak genoeg. Je kunt dan een elastiekje doen om het uiteinde van de pootjes.

9. Het is belangrijk om het frame en het transparante vel regelmatig te reinigen. De schoonmaak instructie kun je op de vorige pagina vinden.
10. Het loshalen van de sheet gaat op precies te tegenovergestelde manier als het assembleren.

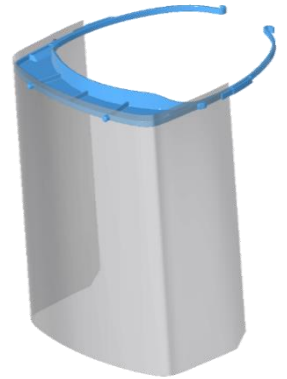

## Aanpassingen zelf doen

We hebben feedback gekregen, dat sommige mensen het vervelend vinden dat de haakjes steeds in het haar blijft steken. Blijft het gelaatsscherm goed zitten en je gebruikt geen elastiekje, dan kun je met een kniptangetje ook de haakjes afknippen.

Sommige mensen vinden de pootjes knellen tegen hun hoofd. De pootjes kun je 'stellen' door de uiteinden van de pootjes even in heet water (moet net van de kook af zijn) te doen. Hierdoor wordt de kunststof zacht en als je het uit het water haalt, moet de pootjes in de juiste vorm houden tijdens het afkoelen. Dit kun je eventueel opnieuw doen totdat de juiste pasvorm bereikt is. Eigenlijk net zoals de opticien je bril stelt.

Tevens is voor sommige mensen het transparante vel te lang, maar je kunt dit zelf makkelijk met een schaar inkorten.

## Bandje voor over het hoofd

Mocht het gelaatsscherm toch nog afzakken, ondanks het elastiekje aan het uiteinde van de pootjes, dan is er een sleufje voorzien aan beide zijkanten. Hier kun je een lint of elastiek aanvast knopen, zodat je extra band over je hoofd hebt.

